

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «АЛКОТЕКТОР»

А. С. Сидоров
«25» июня 2012 г.

Лист 1, листов 1



ИЗМЕНЕНИЕ № 1

к Руководству по эксплуатации «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K»

Внести в Руководство по эксплуатации «Анализаторы паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100 touch-K» следующие изменения:

1) Юридический адрес фирмы-поставщика изложить в следующей редакции:

«Фирма-поставщик: ООО «АЛКОТЕКТОР».

Юридический адрес: 191036, Санкт-Петербург, ул. 1-я Советская, д. 10, лит. А, пом. 2-Н, тел. (812) 456-22-97".

2) Пункт 1.2.7 изложить в следующей редакции:

"1.2.7 Время выхода анализатора на режим измерения после включения, с: не более 5".

3) Пункт 1.2.16 изложить в следующей редакции:

"1.2.16 В термопринтер устанавливается рулон термобумаги следующих размеров: ширина 57±1 мм, внешний диаметр 25±1 мм (длина бумаги в рулоне зависит от плотности термобумаги и составляет около 5-6 м)".

4) Пункт 9 в таблице 3 изложить в следующей редакции:

9	Чехол для анализатора	1 шт.
---	-----------------------	-------

5) Подпись на рисунке 2 и на рисунке 3 «отверстие к сенсорному датчику» заменить на «отверстие к электрохимическому датчику».

6) Четвертый и пятый абзац пункта 2.7.11 изложить в следующей редакции:

«ВНИМАНИЕ! Для исключения возможного влияния на результат измерения этанола, находящегося на слизистой оболочке ротовой полости, перед измерением должно пройти не менее 20 минут после употребления алкогольсодержащих лекарственных препаратов и спреев для ротовой полости, а так же слабоалкогольсодержащих пищевых продуктов (кисломолочные продукты, квас и т.д.).

Во избежание загрязнения заборной системы анализатора анализируемая проба воздуха не должна содержать частиц табачного дыма, мокрот (слюны) и остатков пищи. Поэтому перед измерением:

- ***должно пройти не менее 2 минут после курения;***
- ***рекомендуется прополоскать рот водой после приема пищи непосредственно перед измерением».***

Генеральный директор
ООО «АЛКОТЕКТОР»


А. С. Сидоров

Инженер

ООО «АЛКОТЕКТОР»


Т. Н. Горячкина