

через 2 минуты после последней операции. Если прибор выключился автоматически, кнопка включения/выключения остается в нажатом состоянии. Её следует отжать, при этом включить прибор можно будет через 15 секунд.

Для проведения следующего теста повторите процедуру по п. 8.2.1.

**Внимание!** *Анализируемая проба воздуха не должна содержать частиц табачного дыма, остатков этанола или медикаментозных спиртосодержащих препаратов из ротовой полости, а так же мокрот и слюны, поэтому перед проведением теста должно пройти:*

- не менее 2 минут после курения;
- не менее 20 минут после употребления содержащих этанол препаратов.

*Так как алкоголь всасывается в кровь в течение определенного времени, может пройти более 30 минут после употребления алкогольного напитка до достижения максимальной его концентрации в крови. Этот фактор необходимо учитывать при анализе результатов тестирования и назначении повторного теста.*

**8.2.2. Отбор пробы при недостаточном выдохе. Ручной забор пробы.**

Если выдох не был сделан своевременно, сообщение



сменится сообщением



Выбор пункта меню осуществляется кнопками перемещения вправо/ влево и подтверждается кнопкой ввода.

При выборе пункта «Повтор» процедура возвращается к сообщению «Дуйте. Ручной забор». При выборе пункта «Отказ» появляется сообщение



При отказе от печати нажмите кнопку перемещения вправо или просто выключите анализатор. Для вывода на печать нажмите кнопку ввода. Во время печати на экран выводится:

**Печатается Ждите**

При отказе от печати в п. 9 протокола теста вместо результата будет распечатываться «Тест Отказ». При просмотре памяти прибора результат этого теста будет выглядеть как результат теста с нулевым содержанием этанола, но при распечатке из памяти в протоколе будет распечатываться «Тест Отказ».

После окончания печати выдается сообщение об окончании процедуры тестирования.

**Тест проведен,  
Выключить прибор**

Если обследуемый прерывает выдох раньше времени, появляется сообщение

**Выдох прерван  
Повтор**

Нажав на кнопку ввода , мы вернемся на этап проверки окружающего воздуха и мундштука на этанол. Появляются сообщения:

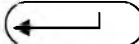
**Идет анализ**



**Содержание Алког  
0.000 mg/L**

**Подготовка**

**Дуйте . . .  
Ручной Забор**

Если обследуемому лицу так и не удастся сделать правильный выдох, нажмите во время выдоха кнопку ввода,  и произойдет ручной забор пробы. Следует иметь в виду, что при ручном заборе пробы результат может быть несколько занижен по сравне-