

Приложение 1 **Формирование базы данных на ПК с помощью программного обеспечения «Статистика PRO-100».**

Применение анализатора паров этанола «Алкотектор» моделей PRO-100 и PRO-100 combi совместно с программным обеспечением «Статистика PRO-100» позволяет легко сохранять базу данных из памяти прибора на персональном компьютере. Создаваемая на компьютере база данных имеет удобный интерфейс, позволяет легко найти и вывести на печать необходимые результаты по дате, времени, номеру теста или серийному номеру прибора.

Минимальные системные требования к ПК


- Intel Pentium или AMD k7 и старше
- 64 Мб RAM
- 63,5 Мб свободного места на HDD
- Операционная система Windows 95/98/ME/2000/XP/2003
- Наличие свободного COM-порта для подключения кабеля
- Манипулятор мышь
- Дисплей VGA или выше

1. Установка программы Статистика PRO-100

Включите компьютер.

После включения и запуска операционной системы вставьте диск в привод компакт-дисков, откройте ярлык «*Мой Компьютер*», откройте диск с программой установки и запустите на исполнение файл Setup-Pro100.EXE.

Вы увидите на экране монитора:

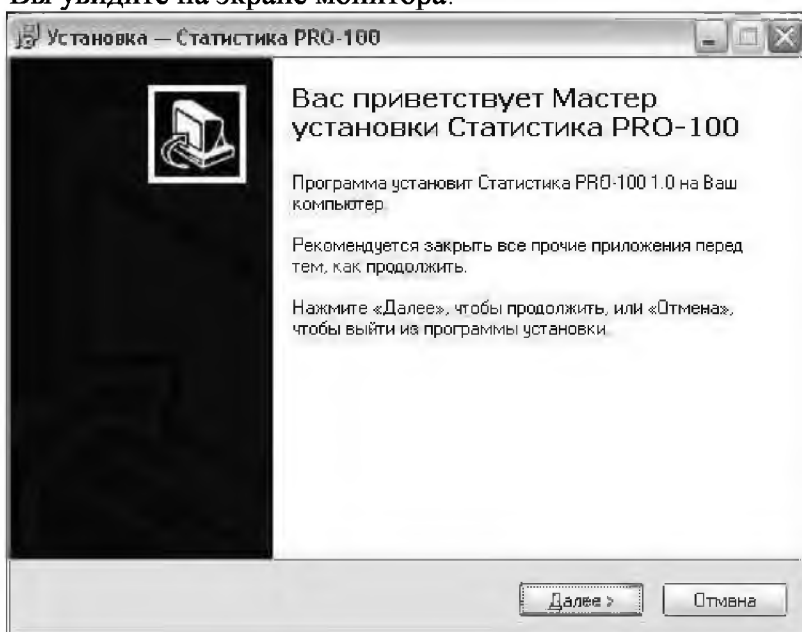

Для установки программы нажмите кнопку «*Далее*», для отмены установки нажмите кнопку «*Отмена*».