

2. Запуск программы

Подключите кабель к COM – порту компьютера.


Подсоедините прибор «Алкотектор» PRO-100 (PRO-100 combi) через соединительный кабель к com-порту Вашего ПК.

Внимание! Рекомендуется все подключения к компьютеру проводить при выключенном питании компьютера.

Включите компьютер


Программа «Статистика PRO-100» открывается двойным щелчком кнопки мыши по ярлыку на рабочем столе или через меню кнопки «ПУСК».

На экране монитора появится:

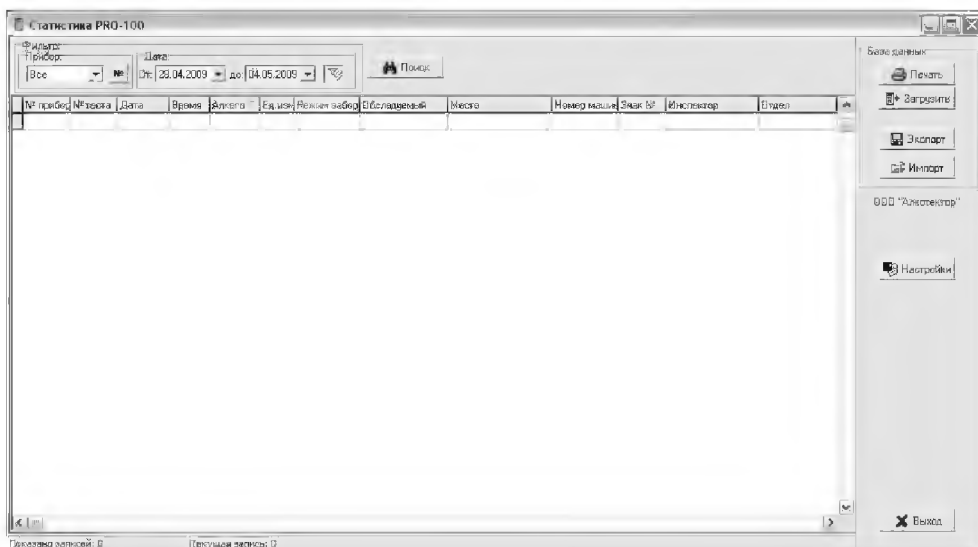


В этом окне Вы начинаете работу.

3. Начало работы.

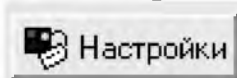

Настройте Вашу программу для работы, нажав кнопку **«Настройки»**:

на экране монитора высветится:

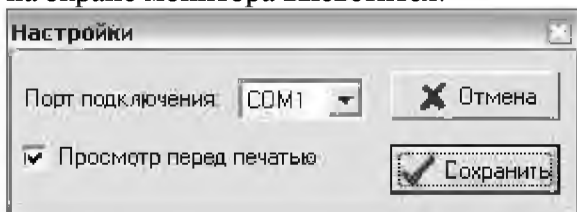


В этом окне нужно выбрать:

- порт, к которому подсоединен кабель;
- просмотр перед печатью: открывает предварительный просмотр перед печатью данных.


После выполнения настройки программы, Вы можете вернуться в основное меню, нажав кнопку **«Сохранить»** тогда все изменения будут записаны, или, нажав кнопку **«Отмена»**, тогда все изменения будут потеряны.


4. Загрузка результатов из памяти прибора в базу данных на ПК.

Для начала сохранения результатов из памяти прибора в компьютер нажмите кнопку **«Загрузить»** в правой части рабочего окна.

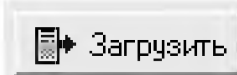

На экране монитора появится сообщение о необходимости подготовить прибор к сохранению данных на компьютере:

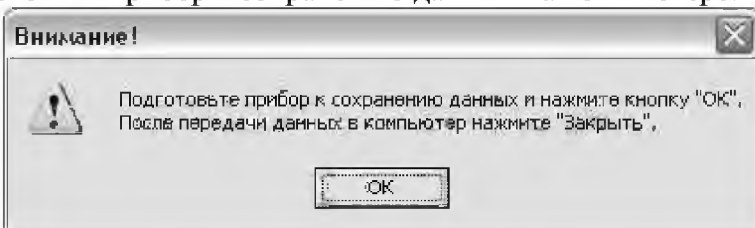

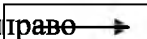Для этого необходимо войти в меню анализатора следующим образом: перед включением анализатора нажмите кнопку перемещения вправо  и, удерживая ее, одновременно нажмите и