

База данных: Печать Загрузить Экспорт Импорт 000 "Аналитик" Настройки Выход

Статистика PRO-100

Фильтр: Пройбор: Все

Дата: От: 28.04.2009 до: 04.05.2009

Поиск

№ з/б/д	№ поста	Дата	Время	Алкоголь	Единица	Режим забор	Обследуемый	Место	Номер машины	Знак №	Инспектор	Отдел
630483	000012	28.12.2008	17:11	0,000	mg/L	Отказ	ИВАНОВ	МОСКВА	МЗ ЮДС	38.0125	ЕРМАКОВ	ДПС
630483	000012	28.12.2008	17:30	0,000	mg/L	Активный	НИКОЛАЕВ	МОСКВА	С 851 КА	98.0125	ЕРМАКОВ	ДПС
630471	000008	11.01.2008	13:06	0,000	mg/L	Активный	ЮЩЕРКО	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	854 МЕ	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630471	000012	11.01.2008	13:20	0,000	mg/L	Пассивный	СОКОЛЬСКИЙ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	358 УУ	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630471	000013	11.01.2008	13:23	0,000	mg/L	Активный	ПОЖИП	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	541 РН	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630471	000014	11.01.2008	13:25	0,000	mg/L	Отказ	ПАРЧИК	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	372 АЕ	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630471	000011	11.01.2008	13:16	0,081	mg/L	Активный	ПЕТРОВ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	167 АЕ	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630483	000011	28.12.2008	17:23	0,146	mg/L	Пассивный	ФРИЛИН	МОСКВА	В 345 РО	98.0125	ЕРМАКОВ	ДПС
630471	000015	11.01.2008	13:28	0,286	mg/L	Активный	ПОЛОСОВ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	962 КА	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630471	800010	11.01.2008	13:11	1,517	mg/L	Активный	ЗАЙЦЕВ	САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	328 МТ	78.0086	ПАВЛОВЧЕНКО	СПЕЦБАТАЛЬ
630483	000010	28.12.2008	17:18	1,576	mg/L	Активный	ДИКОНОВА	МОСКВА	К 812 РН	98.0125	ЕРМАКОВ	ДПС

Показано записей: 0 Текущая запись: 0

Рисунок 1. Вид рабочего окна в программе «Статистика PRO-100».

5. Печать таблицы с результатами.



Кнопка **«Печать»** в правой верхней части рабочего окна позволяет вывести на печать те результаты из базы данных, которые на данный момент находятся в рабочем окне.

Если при настройке программы вы установили флажок **«Прочитать перед печатью»**, после щелчка левой кнопкой мыши на кнопке **«Печать»** на экране появится изображение печатной формы таблицы результатов. При необходимости перед печатью можно настроить положение таблицы на странице с помощью пункта меню **«Поля»**.

6. Сортировка результатов.

Результаты можно сортировать по колонкам в порядке возрастания или убывания.


В примере, приведенном на рис. 1, сортировка сделана по колонке **«Алкоголь»** в порядке возрастания

Алкоголь	Ед. измерения	
0	mg/L	1
0.000	mg/L	Н
0.000	mg/L	17

Чтобы произвести сортировку данных по какой-либо колонке, Вам следует навести курсор на заголовок колонки и сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши.

Появившийся справа от названия колонки треугольник покажет направление возрастания признака.

7. Поиск нужного результата.

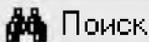

Щелчок левой кнопкой мыши на кнопке **«Поиск»** в верхней части рабочего окна открывает окно для задания признаков, по которым будет вестись поиск результата.